



Couverture chauffante auto-active

- Aide à prévenir l'hypothermie durant toute la période périopératoire
- La couverture chauffe automatiquement au contact de l'air jusqu'à 40°C en moyenne
- Fonctionne sans électricité et sans autres appareils
- Conserve sa température jusqu'à 10 heures
- Facile et rapide à mettre en place



Instructions



1. Ouvrez l'emballage en le déchirant à partir de l'encoche prédécoupée dans le coin supérieur gauche. Enlevez la couverture de l'emballage protecteur extérieur de façon à exposer la couverture à l'air.



2. Ouvrez et dépliez entièrement la couverture. La couverture chauffe dès qu'elle est exposée à l'air. Elle atteint une moyenne de 40°C en 30 minutes et conserve sa température jusqu'à 10 heures.



3. Placez la couverture avec les cousinets vers le haut. Ne mettez aucun autre poids au-dessus des cousinets chauffants.



4. Placez la couverture sur tout le corps du patient durant la période pre- et postopératoire, ainsi que pour des interventions aux mains, bras ou à la tête.



5. Pour les interventions chirurgicales dans la zone abdominale inférieure et aux membres inférieurs, placez la couverture horizontalement sur les membres supérieurs et la poitrine avec la découpe au niveau de la tête.



6. Pour les interventions chirurgicales à la hauteur de la zone thoracale, placez la couverture sur la partie inférieure du corps.

Information générale

- Les cousinets ne peuvent pas être placés les uns sur les autres.
- X-Ray: La couverture ne laisse pas passer les rayons X. Enlevez la couverture de l'endroit où la radiographie doit être faite.
- MRI: Ne pas employer la couverture durant un examen (la couverture contient de la poudre de fer).
- Les cousinets chauffants doivent être placés vers le haut.



- Il est recommandé d'éviter le contact direct avec les plaies, les tuméfactions, les gelures ou la peau désensibilisée. Contrôlez régulièrement la peau des patients qui montrent une sensibilité, un sens de réaction ou de communication particuliers. Ceci en accord avec le protocole de l'hôpital.
- Après l'utilisation, éliminez la couverture avec les déchets ordinaires. La couverture peut également être incinérée.
- À manipuler sous la supervision d'un prestataire de soins de santé.

Précautions

- La couverture n'est pas conçue pour l'utilisation pour enfants.
- En cas de risque d'hypotension prolongée, l'utilisation de la couverture doit être évitée.
- La couverture ne doit pas être utilisée en cas de maladie vasculaire périphérique grave.



Ref.	Description
629900	<p>Couverture chauffante auto-active BARRIER</p> <p>Produit: 12 cousinets chauffants qui sont activés dès l'exposition à l'air (13cmx10cm). Dimensions de la couverture: 152cmx92cm.</p> <p>Matériel: Couches multiples de SMS (polypropylène). Les couches et les poches sont cousues ensemble au moyen de fils en polyester/coton. Les cousinets chauffants sont composés de charbon actif, d'argile, de sel, d'eau et de poudre de fer.</p> <p>Emballage: Conditionnement sous vide dans un sachet en plastique étanche à l'air. Les sachets (10 pièces) sont protégés par un film à bulles d'air et sont ensuite emballés dans une caisse de transport.</p> <p>TRP: 10 pièces</p>

Plus d'info sur notre site web www.molnlycke.be/fr/easywarm

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72 boîte 2, B-2600 Berchem Tel. 03 286 89 50, Fax. 03 286 89 52

Le symbole et le logo de Mölnlycke Health Care, ainsi que les marques commerciales BARRIER® et EasyWarm® sont des marques déposées ou des marques en instance de Mölnlycke Health Care. Copyright (2012)